

# THE TEST

**currexSole**<sup>®</sup>  
NATURAL PERFORMANCE INSOLES

## FOOT PRINT - FUßABDRUCK



**A** High Arch  
*Hohlfuß*



**B** Medium Arch  
*Normalfuß*



**C** Low Arch  
*Senkfuß*



**D** Flat Arch  
*Flachfuß*

## LEG AXIS - BEINACHSE



**1** Bow Leg  
*O-Bein*



**2** Straight Leg  
*Gerades Bein*



**3** Knock Knees  
*X-Bein*

## YOUR RESULT - DEIN ERGEBNIS

A1 · A2 · B1 · B2  
Supination → Neutral

A3 · B3 · C1 · C2 · D1  
Neutral → Overpronation

C3 · D2 · D3  
Overpronation

**HIGH**  
PROFILE

**MED**  
PROFILE

**LOW**  
PROFILE



# INSTRUCTIONS

**currexSole**  
NATURAL PERFORMANCE INSOLES

## FOOT PRINT / FUBABDRUCK

- 1 Remove shoes  
*Schuhe ausziehen*
- 2 Place heel in heelcup  
*Ferse in Fersenschale platzieren*
- 3 Wait for about 10-15 seconds  
*10-15 Sekunden warten*

## LEG AXIS / BEINACHSE

- 1 Stand with your legs relaxed and heels together  
*Mit geschlossenen Knöcheln entspannt stehen*
- 2 Check leg axis with two fingers  
*Beinachse mit zwei Fingern prüfen*

## RESULT / ERGEBNIS

- 1 Combine letter of arch type with number of static leg axis  
*Buchstabe Fußabdruck mit Nummer Beinachse kombinieren*
- 2 Choose corresponding insole  
*Entsprechende Einlage wählen*

## SIZE CONVERTER / GRÖßENUMRECHNER

The FOOTDISC® device shows your regular shoe size. For athletic shoes add about one EU-size.


50	15			340	
49	14	15		330	
48	13	14		320	XXL
47	12	13	15	310	
46	11	12	14	300	XL
45	10	11	13	290	
44	9	10	12	280	L
43	8	9	11	270	
42	7	8	10	260	M
41	6	7	9	250	
40	5	6	8	240	S
39	4	5	7	230	
38	3	4	6	220	XS
37	2	3	5	210	
36	1	2	4	200	
35	13	1	3	190	
34	12	13	2	180	
33	11	12	1	170	
32	10	11			
31	9	10			
30					
29					
28					
27					



currexSole size

EU (French style) UK Kids US Men US Women Mondo (Millimeter)

## FOOTDISC® MAINTENANCE / PFLEGEHINWEISE

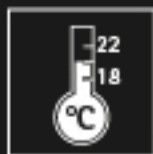

Store between 18°-22°C  
*Bei 18°-22°C lagern*



Soft cloth + disinfectant only  
*Weiches Tuch + Desinfektion*



No shoes on thermo foil  
*Nicht mit Schuhen betreten*



Avoid direct sunlight  
*Keine Sonneneinstrahlung*



Keep dry  
*Vor Nässe schützen*